

Nuevo!
Ahora disponible de
3 a 3 para la arcada inferior!

Fuerza y estética

*Invisible y rápido –
las nuevas cualidades de la belleza*



Quicklear®-Brackets

2ª generación

**FORESTADENT**
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Nuevo!

Este dispone de una superficie pulida mate, con lo cual crea menos reflejos y, por consiguiente, resulta todavía más discreto.

Nuevo!

Los cantos del bracket y del slot se han redondeado más, resultando una mayor comodidad de uso y una fricción reducida

Nuevo!

Ahora disponible de 5 a 5 para superior y 3 a 3 para inferior!

QuicKlear®-Brackets Invisible y rápido



Con el Bracket QuicKlear® de 2ª generación, Forestadent ha sido capaz de mejorar una vez más la versión cerámica del acreditado Sistema Quick. Gracias al nuevo tratamiento de la superficie, el clip metálico ahora presenta un brillo mate en lugar de brillar, con lo cual resulta claramente más discreto. Los cantos del bracket y del slot se redondearon más, reduciendo así la fricción y aportando una comodidad de uso sensiblemente mayor. Los Brackets QuicKlear® de 2ª generación están ahora disponibles también para la mandíbula y completan así el aspecto estético general.

El Bracket QuicKlear® es un bracket cerámico autoligable, de color diente, que complementa de forma óptima el Sistema de Brackets BioQuick® con una variante estética. QuicKlear® es un bracket activo. Dispone del probado y familiar mecanismo de cierre de los sistemas de brackets Quick, asegurando así unos tiempos de permanencia en el sillón cortos. Su estética sobresaliente promete una sonrisa de aspecto natural. Condiciones ideales para tener unos pacientes satisfechos.

Estética óptima

Con QuicKlear® el clínico dispone de un bracket de dos aletas, que respalda la estética natural de cada paciente. Gracias a la cerámica de color diente – desarrollada por la propia Forestadent – los Brackets QuicKlear® asemejan visualmente una parte del diente. El pequeño gancho de cierre está fabricado en una aleación de cromo cobalto, que – al contrario de lo que ocurre con el plástico – no se decolora. La superficie del clip de 2ª generación está pulida mate, generando así claramente menos reflejos y, por consiguiente, apenas es detectable. Si hasta la fecha QuicKlear® estaba disponible de 5 a 5 en el maxilar superior, ahora también está

disponible de 3 a 3 en la mandíbula, de modo que los pacientes pueden mostrar libremente una amplia sonrisa.

Cómodos para el paciente y para el clínico

Para el paciente resultan cómodos los cantos redondeados del bracket y del slot. En la 2ª generación del Bracket QuicKlear® se han diseñado todavía más redondeados y, en consecuencia, más agradables para el paciente y con una menor fricción. Para el clínico resulta cómoda la técnica de cierre probada en los sistemas de brackets Quick: Dos mecanismos integrados garantizan la apertura sencilla y fácil



Los bordes de la ranura redondeados y una ranura con cuatro puntos de contacto producen una mínima fricción

del clip de cierre hacia oclusal. El clip puede abrirse de forma sencilla desde vestibular o desde gingival. Sobre todo, la apertura con sonda desde gingival se ve facilitada por un embudo de inserción, de forma muy marcada, así como por unas ranuras-guía. El cierre se realiza presionando suavemente con el dedo. Cómodo para el clínico y para el paciente: Reducción de los tiempos de permanencia en el sillón.



Tubo distintivo para una fácil apertura de los brackets QuickKlear®

Fuerte sujeción, fácil de descementar

La base patentada del bracket, desarrollada para QuickKlear®, facilita la manipulación segura:

- La base tridimensional en forma de gancho desarrollada para el Bracket bioquick, se mantiene en el QuickKlear pero en este caso los ganchos están socabados en la base del Bracket, produciendo una retención totalmente mecánica. De este modo el Bracket QuickKlear® no sólo posee una excelente adherencia sobre el diente, sino que también permite retirarlo sin dificultades al final del tratamiento, puesto que no existen ganchos cerámicos que puedan fracturarse y quedar dentro del adhesivo. Se evitan los arrancamientos de esmalte, puesto que después de descementar el bracket la mayor parte del adhesivo queda adherido sobre el diente.



Nuevo clip inverso



Descementación a prueba de fracturas con el instrumento de remoción de brackets QuickKlear®

- Unas inclinaciones mesio-distales garantizan un descementado seguro y sin astillamientos del bracket con la ayuda del instrumento de Paul, una herramienta especial para el descementado. Alternativamente, puede utilizarse también para este fin unas pinzas para la remoción de brackets modificadas.



El adhesivo permanece sobre el diente después del descementado de los brackets QuickKlear®



Base del bracket tras la descementación de un bracket QuickKlear®

Combinación perfecta entre estética, precisión y fuerzas reducidas

En las zonas estéticas del maxilar superior y de la mandíbula recomendamos el tratamiento con Brackets QuickKlear®, así como la combinación con Brackets metálicos BioQuick® sobre los premolares inferiores. Esto facilita la introducción en la práctica y no requiere complicados cambios en los protocolos de tratamiento. En el caso de utilizar premolares inferiores de otras marcas, es posible que tenga que introducir dobleces para compensar el in-out. El redondeado de precisión de los cantos del slot de los Brackets QuickKlear® y BioQuick® permite incluso el uso de arcos con un recubrimiento de color diente. Para la consecución de una estética perfecta, recomendamos la utilización y el reemplazo periódico de Arcos Titanol® Cosmetic o de los nuevos Arcos BioCosmetic®, con un recubrimiento claramente más duradero. No obstante, ambas variantes no deberán doblarse o adaptarse, puesto que las herramientas puntiagudas pueden dañar su recubrimiento de color diente. Los arcos BioStarter® o BioTorque® aportan fuerzas reducidas, fricción reducida y unas transferencias de fuerza perfectas, que resultan recomendables para



unos intervalos más largos o cuando son necesarias curvaturas de compensación. Independientemente del arco utilizado, éste puede introducirse en el slot del bracket de forma todavía más sencilla y rápida con la ayuda del nuevo instrumento para arcos Quick. La herramienta especial está indicada tanto para los Brackets Quick, como QuickKlear®.



Introducción del arco con la ayuda del instrumento para arcos de hilo Quick

Quicklear®-Brackets

Slot .018"

Sistema Roth

CE 0297



MAXILLARY										
	–	–	–	C731-0203	C731-0103	C730-0103	C730-0203	–	–	–
	C731-0513	C731-0513	C731-0313	–	–	–	–	C730-0313	C730-0513	C730-0513
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
Rotation	2° distal	2° distal	4° mesial					4° mesial	2° distal	2° distal
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation	4° distal	4° distal	2° mesial					2° mesial	4° distal	4° distal
	731-1603	731-1503	–	C730-1203	C730-1203	C730-1203	C730-1203	–	730-1503	730-1603
	731-1613	731-1513	C731-1413	–	–	–	–	C730-1413	730-1513	730-1613

MANDIBULAR

Casos	1	3
	Ref.	Ref.
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 sin gancho	C706-1078	C706-1079
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 con gancho	C706-1080	C706-1081

Slot .022"

Sistema Roth

CE 0297



MAXILLARY										
	–	–	–	C731-0201	C731-0101	C730-0101	C730-0201	–	–	–
	C731-0511	C731-0511	C731-0311	–	–	–	–	C730-0311	C730-0511	C730-0511
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
In/Out	0,9	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
Rotation	2° distal	2° distal	4° mesial					4° mesial	2° distal	2° distal
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation	4° distal	4° distal	2° mesial					2° mesial	4° distal	4° distal
	731-1601	731-1501	–	C730-1201	C730-1201	C730-1201	C730-1201	–	730-1501	730-1601
	731-1611	731-1511	C731-1411	–	–	–	–	C730-1411	730-1511	730-1611

MANDIBULAR




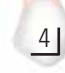

















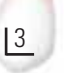


Casos	1	3
	Ref.	Ref.
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 sin gancho	C706-1082	C706-1083
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 con gancho	C706-1084	C706-1085

Slot .018"

McLaughlin/Bennett/Trevisi System

CE 0297

MAXILLARY

	–	–	–	C733-0203	C733-0103	C732-0103	C732-0203	–	–	–
	C733-0513	C733-0413	C733-0313	–	–	–	–	C732-0313	C732-0413	C732-0513
										
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1,3	0,9	0,9	1,5	1,1	1,1	1,5	0,9	0,9	1,3
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation										
										
	733-1603	733-1503	–	C732-1203	C732-1203	C732-1203	C732-1203	–	732-1503	732-1603
	733-1613	733-1513	C733-1413	–	–	–	–	C732-1413	732-1513	732-1613

MANDIBULAR


















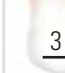



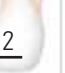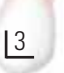


Casos	1	3
	Order-no.	Order-no.
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 sin gancho	C706-0842	C706-0843
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 con gancho	C706-0847	C706-0848

Slot .022"

McLaughlin/Bennett/Trevisi System

CE 0297

MAXILLARY

	–	–	–	C733-0201	C733-0101	C732-0101	C732-0201	–	–	–
	C733-0511	C733-0411	C733-0311	–	–	–	–	C732-0311	C732-0411	C732-0511
										
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1,3	0,9	0,9	1,5	1,1	1,1	1,5	0,9	0,9	1,3
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
Rotation										
										
	733-1601	733-1501	–	C732-1201	C732-1201	C732-1201	C732-1201	–	732-1501	732-1601
	733-1611	733-1511	C733-1411	–	–	–	–	C732-1411	732-1511	732-1611

MANDIBULAR

Casos	1	3
	Order-no.	Order-no.
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 sin gancho	C706-0857	C706-0858
Maxillary: Quicklear® 5-5, 3-5 con gancho Mandibular: Quicklear® 5-5, 3 con gancho + BioQuick® 4-5 con gancho	C706-0862	C706-0863

SMILE^{Rx} – Estética Natural



FORESTADENT, presenta el nuevo SMILE^{Rx}, una nueva prescripción de brackets, que hace realidad una sonrisa aun más estética, consiguiendo una posición dental anatómicamente optima. A lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes sistemas y técnicas en los tratamientos de ortodoncia, predominando en cada época alguno de ellos. Basado en estos mismos y gracias al estudio y asesoramiento de expertos clínicos, FORESTADENT ha desarrollado la técnica SMILE^{Rx}, una nueva prescripción, que basada en los sistemas de mayor uso en la actualidad, les aporta un diferencial muy especial.

Informaciones para el pedido SMILE^{Rx} – BioQuick®/BioPassive® & Quicklear®

Slot .018"



MAXILLARY										CE 0297
	735P0503	735P0503	–	C733-0203	C733-0103	C732-0103	C732-0203	–	734P0503	734P0503
	735P0513	735P0513	C731-0313	–	–	–	–	C730-0313	734P0513	734P0513
Torque	0°	0°	-2°	+10°	+17°	+17°	+10°	-2°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+11°	+8°	+4°	+4°	+8°	+11°	0°	0°
In/Out	0,75	0,75	0,9	1,5	1,1	1,1	1,5	0,9	0,75	0,75
Rotation			4° mesial					4° mesial		
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1,05	1,05	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,05	1,05
Rotation										
	733P1603	733P1503	–	C732-1203	C732-1203	C732-1203	C732-1203	–	732P1503	732P1603
	733P1613	733P1513	C733-1413	–	–	–	–	C732-1413	732P1513	732P1613

MANDIBULAR

Slot .022"



MAXILLARY										CE 0297
	735P0501	735P0501	–	C733-0201	C733-0101	C732-0101	C732-0201	–	734P0501	734P0501
	735P0511	735P0511	C731-0311	–	–	–	–	C730-0311	734P0511	734P0511
Torque	0°	0°	-2°	+10°	+17°	+17°	+10°	-2°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+11°	+8°	+4°	+4°	+8°	+11°	0°	0°
In/Out	0,75	0,75	0,9	1,5	1,1	1,1	1,5	0,9	0,75	0,75
Rotation			4° mesial					4° mesial		
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1,05	1,05	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,05	1,05
Rotation										
	733P1601	733P1501	–	C732-1201	C732-1201	C732-1201	C732-1201	–	732P1501	732P1601
	733P1611	733P1511	C733-1411	–	–	–	–	C732-1411	732P1511	732P1611

MANDIBULAR

Slot .018"

Caso	1	3
Brackets 5-5	20	60
3*	C706-1086	C706-1088
3-5**	C706-1087	C706-1089

Slot .022"

Caso	1	3
Brackets 5-5	20	60
3*	C706-1090	C706-1092
3-5**	C706-1091	C706-1093

*Max. + Mand. Quicklear 3-3, 3 con gancho y BioPassive 4-5 sin gancho
 **Max. + Mand. Quicklear 3-3, 3 con gancho y BioPassive 4-5 con gancho

Quicklear® Starter Kits



***Contenido adicional en cada kit:**

- herramienta de remoción brackets Quicklear
- Alambres BioStarter max .012"
- Alambres BioStarter man .012"
- Typodonto Quicklear
- Sonda guía Quicklear & Quick
- Sonda guía alambres
- crimpable stops
- Quicklear modelo para presentar

Por favor indíquese en el pedido:

Slot .018" Slot .022"

Ganchos en premolares inferiores:

no si

Roth System	Order-No.
Quicklear® starter kit – 3 casos Kit sin brackets	C707-3025
Quicklear® starter kit – 6 casos Kit sin brackets	C707-6025

McLaughlin/Bennett/Trevisi System	Order-No.
Quicklear® starter kit – 3 casos Kit sin brackets	C707-3026
Quicklear® starter kit – 6 casos Kit sin brackets	C707-6026

Accesorios

C501-1842 CE		1	Sonda Quicklear® Komfort, doble
501-0861 CE		1	Sonda para alambres
C501-0815 CE		1	„Pauls Tool“ – herramienta de remoción brackets Quicklear®
C501-0828 CE		1	Alicates de remoción brackets Quicklear®
CE C501-0826		6	Fresa para la eliminación del adhesivo
C950-0005		1	Typodonto Quicklear® y brackets BioQuick® Sistema Roth
C950-0006			Typodonto Quicklear® y brackets BioQuick® Sistema McLaughlin-Bennett-Trevisi



Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com

FORESTADENT de España, S.L.

Oficina de Madrid: General Rodrigo 6-Edificio Germania-7º Planta · 28003 Madrid
Tel. +34 91 533 16 17 · Fax. + 34 91 533 15 67 · E-mail: forestadent@forestadent.es

Oficina de Barcelona: Avda Diagonal 427-1º-2º · 08036 Barcelona
Tel. + 34 93 215 30 61 · Fax. + 34 93 215 96 38 · E-mail: forestadent.bcn@forestadent.es

**FORESTADENT**[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS