



*Favorece y es
fácil de retirar*



GLAM® Bracket



Brackets GLAM[®]

Favorece y es fácil de retirar

FORESTADENT presenta con GLAM[®] su nuevo bracket cerámico de ligadura convencional. Es totalmente transparente y satisface así totalmente los deseos de los pacientes estéticamente exigentes. Los cantos de Slot redondeados aseguran menos fricción y, por consiguiente, unos tiempos de

tratamiento más cortos. Una ventaja para Ud. como clínico: Con la ayuda del Instrumento de Paul es posible retirar este nuevo bracket cerámico de forma particularmente sencilla sin que se fracture. GLAM[®] consigue que sus pacientes presenten un buen aspecto y que Ud. sencillamente trabaje bien.

Estética pura

No sólo los adultos, sino también cada vez más pacientes adolescentes buscan un tratamiento discreto con materiales estéticos. Con el nuevo Bracket GLAM[®] de FORESTADENT puede Ud. satisfacer este deseo sin compromisos. El bracket monopieza resulta particularmente dis-

creto gracias a su novedosa estructura cerámica: Mientras que la superficie lisa de muchos brackets cerámicos llama la atención por unos llamativos reflejos de luz, GLAM® posee un brillo mate y por este motivo tiene un efecto muy discreto. Además, los Brackets GLAM® convencen por su excelente translucidez. Puesto que no poseen un color propio dominante, GLAM® se adapta perfectamente al color natural de los dientes de cada paciente. Pero GLAM® es capaz de todavía más. Gracias a los cantos redondeados de su Slot, presenta no sólo unos valores de fricción bajos, sino que también preserva las superficies de los arcos de color diente. Por ejemplo puede combinarse sin dificultades con los Arcos BioCosmetic®, para lograr una impresión general con una estética óptima. Incluso los pacientes especialmente exigentes mostrarán una sonrisa satisfecha.

Funcional sin compromiso

El Bracket GLAM® está formado por una única pieza de cerámica indeformable. De esta forma las fuerzas clínicas son transmitidas del Slot a la base de forma efectiva y precisa, sin que en este proceso se produzcan pérdidas de torque debidas a transiciones de material o uniones con otras partes de bracket. Además no contiene partes de plástico que puedan decolorarse.

En su manejo GLAM® no se diferencia de otros brackets. Un novedoso marcaje, análogo a la notación de Palmer, impide cualquier confusión a la hora del posicionamiento y posteriormente resulta fácil de eliminar. El ligado se realiza de forma tan probada como familiar.



Notación de Palmer

Los Brackets GLAM® disponen de unos cantos de Slot redondeados. El novedoso procedimiento de fabricación de GLAM® permite conformar las entradas del Slot mucho mejor y más redondeadas que en los procedimientos de fresado convencionales.

GLAM® está disponible de 5-5 en el maxilar superior y en la mandíbula. Opcionalmente están disponibles los Brackets para dientes posteriores (3 o bien 3-5) con ganchos integrados, redondeados, que permiten el uso de cadenas elásticas.

La cerámica no tiene porque fracturarse

La mayoría de pacientes conocen las ventajas estéticas de los brackets cerámicos. No obstante, pocas personas conocen la dificultad del descementado. Para muchos clínicos el astillado o la fractura de la cerámica es un problema inquietante. Para prevenir este riesgo, FORESTADENT durante el desarrollo del Bracket GLAM®



GLAM es nuestro último standard en brackets cerámicos de ligado tradicional. Su material translúcido lo hace realmente estético. Los ejes redondeados del slot permiten la utilización conjunta con el nuevo arco BioCosmetic sin dañarlo, complementando así la apariencia estética. Utilizando el instrumento específico de descementado "Paul's Tool", el bracket Glam puede ser retirado sin fracturas y sin ninguno de los tradicionales problemas de los brackets cerámicos.

ha apostado por aplicar el cúmulo de experiencia ganado a lo largo de dos generaciones del desarrollo de Brackets QuickKlear®. Inspirado por su manejo sencillo, particularmente la sencillez del descementado, GLAM® se ha desarrollado de forma que, utilizando correctamente el Instrumento de Paul, pudiera ser retirado en una sola pieza. Sin astillarse ni fracturarse.

En la mejor compañía

Los Brackets GLAM® se encuentran en la mejor compañía estética. Resulta ideal la combinación con los igualmente nuevos Arcos BioCosmetic®. Gracias a su recubrimiento que permanece blanco de forma duradera, los Arcos BioCosmetic® permiten un tratamiento permanente, visualmente discreto. Combinados con unas ligaduras de goma transparente o ligaduras de acero de color diente, la impresión estética es perfecta.

En mordidas profundas y difíciles a menudo los dientes incisivos superiores chocan contra los brackets cerámicos adheridos sobre los dientes inferiores. Para evitar esta mordida desde buen principio, muchos clínicos recurren al uso combinados de brackets cerámicos vestibulares (max. sup.) y brackets linguales (mand.). Con el Sistema 2D®-Lingual de FORESTADENT está disponible una alternativa ideal justamente para estos casos. De diseño extremadamente bajo, los brackets linguales 2D® aseguran unos tratamientos efectivos con el máximo confort para los pacientes.



Informaciones para el pedido de Brackets GLAM®



Slot .018"

Roth-System

MAXILLARY

CE 0297

	G763-0503	G763-0503	G764-0303	G764-0203	G764-0103	G763-0103	G763-0203	G763-0303	G763-0503	G763-0503
	G763-0513	G763-0513	G764-0313	–	–	–	–	G763-0313	G763-0513	G763-0513
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
In/Out	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0
Rotation			4° mesial					4° mesial		
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0,7	0,7	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,7	0,7
Rotation			2° mesial					2° mesial		
	G763-1603	G763-1503	G764-1403	G763-1203	G763-1203	G763-1203	G763-1203	G763-1403	G763-1503	G763-1603
	G763-1613	G763-1513	G764-1413	–	–	–	–	G763-1413	G763-1513	G763-1613

MANDIBULAR

Casos	1	3
Brackets 5-5	20	60
	G706-0700	G706-0701
3	G706-0710	G706-0711
3-5	G706-0720	G706-0721

Slot .022"

Roth-System

MAXILLARY

CE 0297

	G763-0501	G763-0501	G764-0301	G764-0201	G764-0101	G763-0101	G763-0201	G763-0301	G763-0501	G763-0501
	G763-0511	G763-0511	G764-0311	–	–	–	–	G763-0311	G763-0511	G763-0511
Torque	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
In/Out	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0
Rotation			4° mesial					4° mesial		
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Angulation	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
In/Out	0,7	0,7	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,7	0,7
Rotation			2° mesial					2° mesial		
	G763-1601	G763-1501	G764-1401	G763-1201	G763-1201	G763-1201	G763-1201	G763-1401	G763-1501	G763-1601
	G763-1611	G763-1511	G764-1411	–	–	–	–	G763-1411	G763-1511	G763-1611

MANDIBULAR

Casos	1	3
Brackets 5-5	20	60
	G706-0705	G706-0706
3	G706-0715	G706-0716
3-5	G706-0725	G706-0726

Informaciones para el pedido de Brackets GLAM®



Slot .018"

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System

MAXILLARY

CE 0297

	G761-0503	G761-0403	G762-0303	G762-0203	G762-0103	G761-0103	G761-0203	G761-0303	G761-0403	G761-0503
	G761-0513	G761-0413	G762-0313	-	-	-	-	G761-0313	G761-0413	G761-0513
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1,35	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,35
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	0°	0°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	0°	0°
In/Out	0,7	0,7	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,7	0,7
Rotation										
	G761-1603	G761-1503	G762-1403	G761-1203	G761-1203	G761-1203	G761-1203	G761-1403	G761-1503	G761-1603
	G761-1613	G761-1513	G762-1413	-	-	-	-	G761-1413	G761-1513	G761-1613

MANDIBULAR

Casos	1	3
Brackets 5-5	20	60
	G706-0759	G706-0760
3	G706-0762	G706-0763
3-5	G706-0765	G706-0766

Slot .022"

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System

MAXILLARY

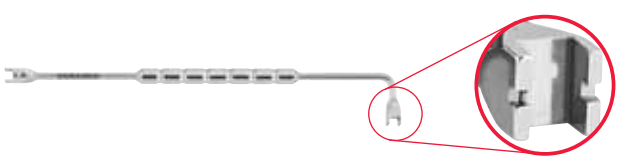

CE 0297

	G761-0501	G761-0401	G762-0301	G762-0201	G762-0101	G761-0101	G761-0201	G761-0301	G761-0401	G761-0501
	G761-0511	G761-0411	G762-0311	-	-	-	-	G761-0311	G761-0411	G761-0511
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1,35	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,35
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	0°	0°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	0°	0°
In/Out	0,7	0,7	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,7	0,7
Rotation										
	G761-1601	G761-1501	G762-1401	G761-1201	G761-1201	G761-1201	G761-1201	G761-1401	G761-1501	G761-1601
	G761-1611	G761-1511	G762-1411	-	-	-	-	G761-1411	G761-1511	G761-1611

MANDIBULAR

Casos	1	3
Brackets 5-5	20	60
	G706-0735	G706-0736
3	G706-0740	G706-0741
3-5	G706-0745	G706-0746

Accesorios

C501-0815 CE		1	„Pauls Tool“ – herramienta de remoción brackets GLAM® y QuicKlear®
G950-1000		1	Typodonto con brackets GLAM®

Arcos BioCosmetic® Superelastico, empaque individualt

CE 0297

Order-no. Max.	Order-no. Mand.	Dimension*	Fuerza	Slot	
217-0845	217-0945	.017"	25 g	.018"/.022"	
217-0850	217-0950	.019"	40 g	.022"	